

## 圖示


## 自行操作式梯級升降機操作指示

### 開始操作梯級升降機

#### 層站控制箱 (參照:圖一)

把公用匙插入控制箱的鎖匙位，並扭向“1”或“ON”位 (參照:圖二)。  
 按緊正確的方向掣 (▽ / ▽，參照:圖三)，使梯級升降機駛往所需的層站。  
 按一下 掣 (參照:圖四)，放下輪椅平台 (參照:圖五)。  
 把公用匙扭向“0”或“OFF”位 (參照:圖六)，然後抽出公用匙。移動輪椅到平台上。

#### 輪椅平台控制箱 (參照:圖七)

如設備附有安全帶 (參照:圖八)，輪椅使用者必須在操作梯級升降機時全程扣上安全帶。  
 把公用匙插入平台上的鎖匙掣，並將公用匙扭向“1”或“ON”位 (參照:圖九)。  
 按緊正確的方向掣 (▽ / ▽，參照:圖十)，使梯級升降機駛往所需的層站。  
 當梯級升降機抵達所需層站及放下斜板後 (參照:圖十一)，把公用匙扭向“0”或“OFF”位 (參照:圖十二)。  
 抽出公用匙，解開安全帶，並移動輪椅離開平台。


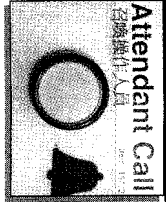
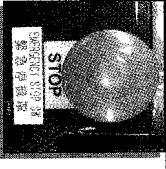
### 使用梯級升降機後

#### 層站控制箱 (參照:圖十三)

把公用匙插入控制箱的鎖匙位，並轉向“1”“ON”位 (參照:圖十四)。  
 按一下 掣 (參照:圖十五)，摺起輪椅平台 (參照:圖十六)。  
 把公用匙轉向“0”或“OFF”位 (參照:圖十七)，然後抽出公用匙。

## 圖示

## 自行操作式梯級升降機操作指示

			
--	---	---	--

**注意事項**  
自行操作式的梯級升降機，需要以公用匙啟動。  
在使用梯級升降機前，輪椅使用者應留意及避免超出梯級升降機所設定的載重及高度限制。  
如使用時發生機件故障，請按橙色的“召喚操作人員”掣（參照：圖十八）或直接致電升降機保養承建商，要求派職員到場協助。  
當遇到緊急事故，需要停止操作梯級升降機時，請立即按下紅色的“緊急停止”掣（參照：圖十九）。